

Альтернативные образцы для исследования

Категория	Общие комментарии	Комментарии по упаковке
Кровь (цельная)^	Медицинская кровь в вакуумной колбе	Отправьте в оригинальной колбе
Кровь (пятна)^	Пластыри, тампоны, салфетки	Отправьте в бумажном конверте
Окурки от сигарет	От 2х до 4х окурков	Отправьте в бумажном конверте
Зубная нить	Не прикасайтесь к нити вашими пальцами	Отправьте в бумажном конверте
Ушная сера	Хлопковый шарик или ватная палочка	Отправьте в бумажном конверте
Жевательная резинка	Не прикасаться к жевательной резинке пальцами	Отправьте в пластиковой застегивающейся упаковке
Волос	Корни фолликул должны быть приложены. Волос со щетки или расчески может не подойти. Нам нужно не менее 6-10 волос	Отправьте в пластиковой застегивающейся упаковке
Ногти (рук, ног)	3-4 ноготка	Отправьте в пластиковой застегивающейся упаковке
Лезвия (кровь)	Положите лезвия в бумажный конверт	Отправьте в бумажном конверте
Сперма/семя	Жидкое семя: абсорбируйте предполагаемый образец семени (спермы) на чистый ватный шарик. Высушите шарик в течении 1 часа. Сухие пятна семени(спермы): абсорбируйте пятна семени на чистый хлопковый шарик. Высушите шарик в течении 1 часа.	Отправьте в бумажном конверте
Зубы	Предпочтительны коренные, малые коренные или клыки. (Детские зубы обычно не подходят),зуб с кровью	Отправьте в бумажном конверте
Зубная щетка	Высушите зубную щетку на 30-60 минут	Отправьте в бумажном конверте
Палочка для чистки зубов	Не прикасайтесь к палочке для чистки зубов	Отправьте в бумажном конверте
Носовой платок	Носовая слизь. Положите в бумажный конверт	Отправьте в бумажном конверте
Использованная салфетка	Носовая слизь. Положите в бумажный конверт	Отправьте в бумажном конверте
Отпавшая пуповина	В сухом виде	В пакет ,либо конверт
Образцы ткани	В парафине, либо под лабораторное стекло (нельзя в формалине)	В парафине, либо под лабораторное стекло (нельзя в формалине)